


data projektu	nazwa handlowa produktu	numer projektu	surowiec
2.09.2025	SZD „lotka_2025-01-09_opakowania-marki-Swiat-Zdrowia_krople-do-oczu-nawilzajace_y03		
wymiar siatki (szer. x wys. x gł.)	kolorystyka		uszlachetnianie
148 x 179 mm	 CMYK		

NEKK

NEKK Sp z o.o., ul. Sielska 8, 60-129 Poznań

KROPLE DO OCZU

Nawilżające



Świat Zdrowia

Krople do oczu nawilżające
WYRÓB MEDYCZNY**SKŁAD:**

Główny składnik:
hialuronian sodu (2 mg/ml).
Składniki dodatkowe:
chlorek sodu, disodu wodorofosforan, diwodorofosforan sodu
dwuwodny, poliheksamid, woda do wstrzykiwań.

Krople do oczu nawilżające kąją i zapewniają komfort oczom.**SPOSÓB UŻYWANIA:**

- Przed pierwszym użyciem usunąć pierścień zabezpieczający z butelki, aby zapobiec jego wypadnięciu podczas stosowania kropli.
- W razie potrzeby wkroplic jedną lub dwie krople do każdego oka lub stosować zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.
- Mrugnąć kilka razy.
- Po użyciu dokładnie zakręcić nakrętkę.

PRZECIWWSKAZANIA:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu, podrażnienia, bólu, zaczerwienienia lub niewyraźnego widzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Nie stosować, jeśli pierścień zabezpieczający jest uszkodzony przed pierwszym użyciem.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Nie dotykać końcówką dozownika żadnej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie roztworu.
- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Roztwór należy zużyć w ciągu jednego miesiąca od otwarcia butelki.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**UTYLIZACJA ODPADÓW:**


- Wylej niewykorzystane krople do oczu do kanalizacji.
- Pustą butelkę wyrzuć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

**CE**
2460**MD****STERILE** **A**

 Stericon Pharma Pvt. Ltd. Plot No. 9R, Sub Layout of Plot No. 9, I phase, Bommasandra Industrial area, Bangalore – 560 099, Karnataka, Indie

EC REP MYM STC, SL.Avda. de los Rosales 32, 28935 Móstoles, Madrid, Hiszpania
direccion@mym-stc.com

 Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń, Polska

 Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa, Polska
www.synoptispharma.pl

24015941
PELi-110/R1 z dnia 24.07.2025
KR/DRUGS/KTK/28/332/2002