

MAŚĆ DO NOSA

Z PREBIOTYKIEM I OLEJEM Z OGÓRECNIKA



Świat Zdrowia

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego **Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika

Wyrób medyczny

15 g

MD **REF** ENT10

1. Co to jest Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika?

Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika to wyrób medyczny o właściwościach nawilżających oraz wspomagających utrzymanie odpowiedniej wilgotności błon śluzowych oraz podrażnionej i popękanej skóry w okolicy nosa. Zawarte w maści składniki tworzą ochronną barierę zabezpieczającą przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, a tym samym chroniącą przed podrażnieniami. **Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika** wzbogacona jest dodatkowo o prebiotyk Biolin P, który wspomaga rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej, tym samym zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów patogennych.

2. W jakim celu stosuje się Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika?

Suchość nosa jest powszechnie występującym problemem zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Może się ona pojawiać w wyniku zbyt długiego przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach czy innych miejscach o zbyt niskiej wilgotności, np. w czasie sezonu grzewczego. Suchość nosa towarzyszy także wielu chorobom, alergii oraz jest wynikiem stosowania niektórych leków. Problem ten dotyka również osoby starsze oraz narażone na działanie substancji chemicznych lub drażniących (np. w miejscu pracy).

Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika nie tylko nawilża, ale także utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności błon śluzowych przez dłuższy czas, tym samym łagodząc nieprzyjemne odczucia związane z ich suchością.

Śluzówka nosa jest szczególnie narażona na działanie czynników zewnętrznych, zwłaszcza podczas infekcji lub stanów alergicznych, powodujących jej podrażnienie, pieczenie czy ból. Zastosowanie wyrobu medycznego **Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika** zmniejsza odczucie dyskomfortu poprzez wytworzenie warstwy ochronnej, ograniczającej

dostęp czynników drażniących do błony śluzowej. Dodatkowo wyrób medyczny może być także stosowany na popękane i podrażnione okolice nosa, spowodowane częstym dmuchaniem nosa podczas infekcji czy alergii.

3. Dawkowanie i sposób podania

Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika należy stosować zgodnie z instrukcją używania.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego **Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika** należy dokładnie umyć ręce. Niewielką ilość maści rozprowadzić równomiernie na błonach śluzowych nosa lub w okolicach nosa. Stosować kilka razy dziennie w miarę potrzeby.

Wyrób przeznaczony dla dzieci od pierwszego roku życia i dorosłych.

4. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu.

Produkt donosowy, unikać kontaktu z oczami.

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić Producentowi i Właściwemu Organowi Państwa Członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

5. Sposób przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Skład

Woda, wazelina, gliceryna, olej parafinowy, uwodornione monoglicerydy oleju kokosowego, 1,2-heksanodiol, estry gliceryny i kwasu tłuszczowego, stearynian gliceryny SE, oliwa z oliwek (1,00%), olej z ogórecznika lekarskiego (1,00%), octan tokoferylu, Biolin P (2,00%)*, karbomer, alkohol cetearylowy, stearynian gliceryny, benzoesan sodu, guma ksantanowa, wodorotlenek sodu, EDTA.

** ilość zależna od zawartości inuliny*

7. Opis opakowania

Maść do nosa z prebiotykiem i olejem z ogórecznika pakowana jest w plastikową tubę zawierającą 15 g wyrobu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, zadrukowaną tubę oraz instrukcję używania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

 Producent:

Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Górników 21/26
30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

 Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl



Symbole użyte na opakowaniu:



Producent



Dystrybutor



Data ważności



Numer serii



Zajrzyj do instrukcji używania



Ograniczenie temperatury przechowywania produktu



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Wyrób medyczny



Numer katalogowy

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: maj 2024.
MNPO/R/IIU/05/2024