

plastry na opryszczkę

z kwasem hialuronowym



Świat Zdrowia

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego **Plastry na opryszczkę z kwasem hialuronowym**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

Plastry na opryszczkę z kwasem hialuronowym

Wyrób medyczny

Czym jest opryszczka?

Opryszczka jest infekcją wywołaną obecnością wirusa, która objawia się skupiskiem pęcherzy skórnych, często pojawiających się na ustach, powszechnie nazywanych zimnem.

Jakie są objawy?

Początkowo opryszczka daje odczucie ciepła i mrowienia na czerwieni wargowej, w ciągu kilku godzin zaczynają pojawiać się wypełnione płynem pęcherzyki.

Pojawienie się opryszczki może zbiegać się w czasie z wyczerpaniem, gorączką, początkiem miesiączki, stresem, ekspozycją na silne światło słoneczne lub spożyciem niektórych pokarmów. Niestety opryszczka łatwo powraca, ponieważ wirus, który ją wywołuje, przeżywa w niektórych komórkach i nie jest całkowicie eliminowany nawet przy użyciu skutecznych leków.

Środki ostrożności, które należy przedsięwziąć podczas stosowania wyrobu medycznego

Unikaj kontaktu ust z ciałami innych osób, dopóki pęcherze całkowicie nie znikną. Opryszczka wargowa jest wysoce zaraźliwa!

Unikaj bardzo gorących lub zimnych pokarmów, ponieważ mogą one podrażnić obszary dotknięte opryszczką.

Dlaczego warto stosować wyrób medyczny Plastry na opryszczkę z kwasem hialuronowym?

Miękki poliuretanowy krążek pokryty jest hipoalergicznym klejem, w którym został rozprowadzony kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy dzięki swojej zdolności do magazynowania wody utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia, łagodząc uczucie swędzenia.

Skuteczność przez 12 godzin.

Plaster stanowi barierę, która chroni przed środowiskiem zewnętrznym, zmniejszając możliwość infekcji i zabezpieczając skórę przed powstawaniem blizn.


Instrukcja używania

Przed nałożeniem plastrów umyj ręce.

Upewnij się, że na obszarze dotkniętym opryszczką nie ma śladów kremu, a skóra jest sucha – dzięki temu plaster będzie dobrze przylegał.

1. Otwórz opakowanie ochronne.
2. Wyjmij plaster, trzymając go za podłużny aplikator.
3. Umieść plaster na dotkniętym opryszczką obszarze i odklej aplikator, aby plaster całkowicie przylegał do opryszczki.
4. Usuń niebieską folię ochronną, dzięki czemu na ustach pozostanie niewidoczny plaster.

Plaster noś tak długo, aż sam się odklei. Kontynuuj aplikację, aż opryszczka zniknie.

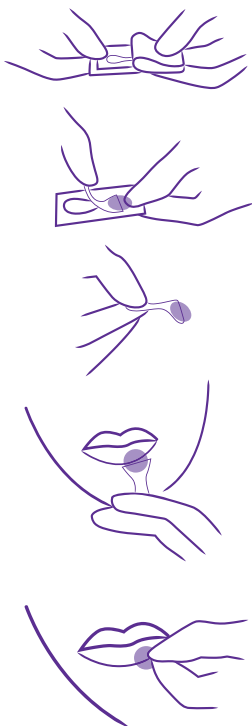

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić do producenta oraz do właściwego organu.

CE 0051

REF CFUA120733



 Eurosirel S.p.A.

Viale Europa, 30, 20047 Cusago (MI) – Włochy
eurosirel@eurosirel.com

 Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl