



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania, która zawiera ważne informacje dla użytkownika.

Proctocalm

Krem

Wyrob medyczny

Tuba z dołączonym aplikatorem

20 ml

Skład: woda oczyszczona, poloxamer 407, makrogol 400, parafina ciekła, płynny wyciąg z kwiatów nagietka lekarskiego, etanol, dekspantenol, suchy wyciąg z liści oczaru wirginijskiego, dodekahydrat fosforanu disodu, olejek eteryczny z mięty pieprzowej, alantoina, hialuronian sodu, dwuwodny fosforan sodu, diglukokobian chlorheksydyny.

Postać i zawartość opakowania:

Proctocalm, 20 ml, tuba z dołączonym aplikatorem. Proctocalm to krem w kolorze od żółtego do brązowego o charakterystycznym zapachu.

Co to jest Proctocalm i w jakim celu się go stosuje:



Działanie wyrobu medycznego Proctocalm opiera się na zawartości kwasu hialuronowego, który występuje w produkcie jako hialuronian sodu. Kwas hialuronowy jest naturalnym, fizjologicznym składnikiem tkanki łącznej. Działa jako wsparcie strukturalne, nadając tkance napięcie i elastyczność. Kwas hialuronowy wspomaga proces reepitalizacji (pokrycie przez nowy nabłonek) i naprawy tkanki.

Proctocalm jest przeznaczony jako dodatkowa terapia w celu usunięcia dolegliwości spowodowanych przez hemoroidy zewnętrzne i wewnętrzne, do pielęgnacji i regeneracji skóry i błony śluzowej okolic odbytu, zapewniając przyjemne uczucie chłodzenia.

Sposób użycia wyrobu medycznego Proctocalm:

Przed i po użyciu preparatu należy umyć ręce. Zaleca się stosować 2-3 razy dziennie, na czystą okolicę odbytu. W przypadku dyskomfortu spowodowanego hemoroidami zewnętrznymi należy wycisnąć niewielką ilość kremu i nałożyć jego cienką warstwę bezpośrednio na zmienione miejsca, najlepiej po opróżnieniu jelita grubego. Jeśli hemoroidy są wewnętrzne, należy przymocować aplikator do tuby, zdjąć osłonę i wprowadzić go do odbytu. Delikatnie ścisnąć tubkę, aby krem równomiernie przeszedł przez otwory wzdłuż aplikatora do miejsca zmienionego chorobowo. Delikatnie obrócić tubkę, aby ułatwić rozprowadzenie kremu.

Po użyciu aplikatora należy go umyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego mydła, a następnie wytrzeć. Zaleca się stosowanie produktu przez pojedynczego użytkownika. Krem przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych. Czas stosowania produktu zależy od szybkości ustępowania objawów. Ciągłe stosowanie wyrobu medycznego Proctocalm nie powinno być dłuższe niż miesiąc. Jeśli objawy utrzymują się i nie ma poprawy, należy skonsultować się z lekarzem.

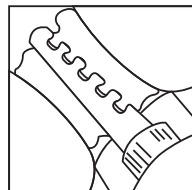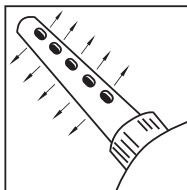

Kiedy nie należy stosować wyrobu medycznego Proctocalm:

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Bezpieczeństwo stosowania wyrobu medycznego Proctocalm w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone. W tych sytuacjach należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami:

Interakcje z innymi produktami nie są znane, dlatego przed zastosowaniem Proctocalm jednocześnie z innymi wyrobami medycznymi lub lekami do podawania doustnego należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Stosowanie wszystkich produktów do użytku miejscowego, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania, może powodować uczulenie. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem w celu rozpoczęcia odpowiedniej terapii. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, które nie zostały opisane w tej ulotce, należy poinformować o tym lekarza.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

Ostrzeżenia:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Unikać kontaktu z oczami. Nie należy połykać.


Przechowywanie:

Produkt przechowywać w zamknięciu, chronić przed światłem i ciepłem, w temperaturze do 25°C.

Data ważności:


Wskazana na opakowaniu.

Termin ważności po pierwszym otwarciu to 28 dni.

 Pharmedica d.o.o.
Industrijska 8
11500 Obrenovac, Serbia

 Salus Cons Kft.
Bécsi krt. 23
6722 Szeged, Węgry

 Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń

 Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl



Objaśnienie symboli użytych na opakowaniu:



Kod partii



Data ważności



Górna granica temperatury



Wytwórca



Zapoznaj się z instrukcją używania



Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej, Wyrób medyczny



Upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja: maj 2019 r.