

SILIKONOWY żel na blizny



Świat Zdrowia

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta dotyczące zastosowania wyrobu.

Instrukcję używania należy zachować, aby w razie konieczności móc ponownie ją przeczytać.

Silikonowy żel na blizny

Wyrób medyczny

20 ml

OPIS WYROBU MEDYCZNEGO

Specjalistyczny wyrób medyczny do stosowania wspomagająco przy leczeniu blizn różnego pochodzenia, stosowany po całkowitym wyleczeniu rany.

Wyrób ma działanie wygładzające i rozluźniające tkankę blizny, przez co zmiękcza i uelastycznia bliznę, poprawiając jej wygląd, blizny stają się mniej przebarwione. Stosowanie wyrobu redukuje świąd i uczucie napięcia.

Pozostaje w miejscu aplikacji w formie nieklejącej się warstwy ochronnej.

Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów, w tym SLS, SLES.

Nie klei się.

Bezpieczny dla skóry.

Całodniowa ochrona.

SKŁAD

BioGenic Gensil-210L: polidimetylosiloksan, woda, kopolimer dimetikonu i dimetikonu winylowanego, glikol butylenowy, sól sodowa kwasu hialuronowego, fenoksyetanol, hydroxypropyl bispalmitamide mea; polidimetylosiloksan, trimetylosiloksykrzemian, kopolimer dimetikonu, dwutlenek krzemu.

INFORMACJE OGÓLNE I WSKAZANIA

Wyrób medyczny jest zalecany w celu:

- 1) wspomagania leczenia blizn różnego pochodzenia, między innymi po:
 - oparzeniach,
 - urazach (otarcia, skaleczenia),
 - zabiegach chirurgicznych (cesarskie cięcie),
 - leczeniu operacyjnym,
- 2) jako warstwa ochronna miejsca gdzie występuje blizna (ochrona przed ocieraniem i słońcem).

MECHANIZM DZIAŁANIA WYROBU

Po aplikacji wyrobu na skórze następuje wytworzenie powłoki ochronnej, utrzymującej się w miejscu aplikacji, co znacznie re-

dukuje tarcie i daje długotrwałą ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem blizny oraz otarciami i podrażnieniami. Stosowanie żelu zapewnia skórze prawidłowe nawilżenie w miejscu, gdzie występuje blizna. Aplikacja wyrobu połączona z masażem blizny rozluźnia tkankę blizny.

SPOSÓB UŻYCIA

Aplikuj wyrób na blizny po całkowitym wyleczeniu rany, wtedy kiedy odpadną strupki.

Aplikuj wyrób bezpośrednio na bliznę, zaczynając od środka blizny do jej brzegu.

Kolistymi ruchami wykonaj masaż blizny.

Wyrób można stosować w ilości zależnej od potrzeb, jednak nie więcej niż 4 razy dziennie.

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na nieuszkodzoną skórę.

OSTRZEŻENIA I PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku uczulenia na zawarte w wyrobie medycznym składniki.

Nie stosować, jeśli po zastosowaniu produktu wystąpią objawy swędzenia lub pieczenia, co może świadczyć o uczuleniu na składniki wyrobu medycznego. Wówczas **NALEŻY ZAPRZĘSTAĆ STOSOWANIE WYROBU.**

Należy unikać przypadkowego kontaktu wyrobu z oczami i błonami śluzowymi.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Nie stosować na niewyleczone rany.

Nie stosować bezpośrednio po aplikacji żelu na bliznę innych preparatów.

Chronić przed dziećmi.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Nie używać, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.

Stosowanie Silikonowego żelu na blizny może powodować pojawienie się artefaktu niepożądanego podczas badania MRI.

Silikonowy żel na blizny może być mylony z metalicznym ciałem obcym.

Powyższe ostrzeżenie należy przekazać personelowi fachowemu wykonującemu badania MRI.

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na nieuszkodzoną skórę.

PRZECHOWYWANIE

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze 5-30°C.

Chronić przed światłem i źródłami ciepła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować wyrobu medycznego w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Opakowanie wyrobu zawiera:

tubę wypełnioną żelem (20 ml), instrukcję używania.

 LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 8, 32-064 Niegoszowice
tel./fax +48 12/ 283 88 60

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl

Symbole użyte na opakowaniu:



Wytwórca



Niesterylne



Należy zapoznać się z instrukcją używania



Ograniczenie temperatury



Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Data ważności



Kod partii



Wyrób medyczny



Znak CE

Data aktualizacji instrukcji: wydanie 03 z dnia 17.05.2022 r.