

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu Spray do nosa, Świat Zdrowia, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc ją powtórnie przeczytać.

Spray do nosa, Świat Zdrowia**30 ml****WYRÓB MEDYCZNY**

Składniki: woda demineralizowana, nanosrebro, gliceryna, nanomiedź, chlorek sodu, polisorbat 20, chlorek potasu, olejek eukaliptusowy.

Postać preparatu: wyrób medyczny w postaci sprayu (płyну) znajdującego się w butelce z aplikatorem o pojemności 30 ml (300 dawek).

Zastosowanie: wyrób medyczny **Spray do nosa, Świat Zdrowia** może być stosowany wspomagająco w:

- regeneracji błony śluzowej nosa,
- tworzeniu na powierzchni błony śluzowej nosa filmu ochronnego, który zabezpiecza ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych,
- stanach nieżytu nosa i zatok.

Wskazania: produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności: nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu. Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie należy używać po upływie terminu ważności.

Stosowanie wyrobu medycznego w okresie ciąży i karmienia pierśią należy skonsultować z lekarzem.

Sposób użycia: przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypęłnić go płynem.

Należy umieścić aplikator w otworze nosowym i naciskając, rozpylić spray do każdego otworu nosowego. U dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych zaleca się stosować 1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie. Ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji jedno opakowanie należy przeznaczyć dla jednej osoby. Po każdym użyciu wyrobu końcówkę aplikatora należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

Przechowywanie: przechowywać w temperaturze 5-25°C w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

 **Producent:**
GLOBAL PHARMA CM S.A.
ul. Berezów 49A
26-130 Suchedniów

Dystrybutor:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl



 WYRÓB MEDYCZNY

Data opracowania instrukcji używania: 09/2022 r.

Wyjaśnienie użytych symboli:

SYMBOL	ZNACZENIE
	Numer serii produktu
	Data ważności produktu
	CE – potwierdzenie spełnienia norm UE
	Zakres temperatur przechowywania
	Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone
	Producent
	Konieczność zapoznania się z dołączoną do wyrobu instrukcją używania