

SPRAY DO HIGIENY USZU



Świat Zdrowia

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje. Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Spray do higieny uszu

Wyrób medyczny

SPIS TREŚCI:

1. Co to jest wyrób medyczny *Spray do higieny uszu* i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego *Spray do higieny uszu*
3. Jak stosować wyrób medyczny *Spray do higieny uszu*
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać wyrób medyczny *Spray do higieny uszu*
6. Skład wyrobu medycznego *Spray do higieny uszu*
7. Opis opakowania

1. CO TO JEST WYRÓB MEDYCZNY *SPRAY DO HIGIENY USZU* I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Spray do higieny uszu to skuteczna, bezpieczna i prosta metoda zmiękczenia i naturalnego usuwania woskowiny usznej oraz zapobiegania gromadzeniu się wody w uchu podczas pływania (tak zwane „ucho pływaka”). Dzięki jego stosowaniu zmniejsza się konieczność zabiegowego usuwania woskowiny usznej przez lekarza. Podczas stosowania *Spray do higieny uszu* woskowina stopniowo ulega rozpuszczeniu i jest naturalnie usuwana z ucha.

Woskowina jest wydzieliną gruczołów znajdujących się w uchu. Jej nadmierne wydzielanie może doprowadzić do powstawania złogów (korków, czopów) woskowiny a w konsekwencji do bólu ucha, uczucia dyskomfortu, a w szczególnych przypadkach pogorszenia słuchu, z jego utratą włącznie.

Zalegająca w uchu woda sprzyja rozwojowi bakterii i może doprowadzić do powstania zapalenia ucha. *Spray do higieny uszu* tworzy na skórze wewnątrz ucha barierę ochronną, dzięki czemu skutecznie zapobiega gromadzeniu się wody w jego wnętrzu.

Wyrób medyczny *Spray do higieny uszu* dzięki zastosowanemu systemowi rozpylania może być aplikowany zarówno w pozycji stojącej, siedzącej jak i leżącej, ulegając bardzo dobremu rozproszeniu w kanale słuchowym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM WYROBU MEDYCZNEGO *SPRAY DO HIGIENY USZU*

Nie należy stosować wyrobu medycznego *Spray do higieny uszu*:

- w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,
- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji błony bębenkowej,
- w przypadku obecności lub podejrzenia obecności ciała obcego w uchu,
- w przypadku wycieku z ucha,
- bez konsultacji z lekarzem u dzieci poniżej 3. miesiąca życia,
- bez konsultacji z lekarzem w przypadku bólu ucha, któremu towarzyszy podwyższona temperatura ciała,
- w przypadku chorób narządu słuchu,
- do innych otworów ciała, np. oka, nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Kobiety w ciąży przed zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza. W przypadku występowania częstych i niewyjaśnionych dolegliwości ze strony ucha zewnętrznego zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ WYRÓB MEDYCZNY SPRAY DO HIGIENY USZU**Sposób użycia:**

Wyrób medyczny przeznaczony do podawania do ucha.

Instrukcja podawania wyrobu medycznego *Spray do higieny uszu*:

1. Przed pierwszym użyciem ustawić aplikator w pozycji poziomej i nacisnąć dozownik 3-4 razy w celu napełnienia go płynem.
2. Delikatnie pociągnąć górny płatek ucha w górę i w kierunku tyłu głowy.
3. Trzymając buteleczkę w pozycji pionowej, wprowadzić aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć mocno górną część dozownika.
4. Po aplikacji wymasować od zewnętrznej strony przednią część kanału słuchowego (skrawek).
5. W razie potrzeby powtórzyć czynności opisane w punkcie 2 i 3 dla drugiego ucha.
6. Po użyciu końcówkę dozującą opłukać w ciepłej wodzie i wysuszyć.
7. Aplikator obrócić do pozycji pionowej w celu zabezpieczenia przed przypadkowym wydozowaniem płynu.

Dawkowanie:

Dzieci powyżej 3. miesiąca do 12. roku życia:

- w celu usunięcia zalegającej woskowiny: 1 dawka 2-3 razy dziennie do każdego ucha, aż do rozpuszczenia woskowiny;
- profilaktycznie w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny: 1 dawka 1 raz w tygodniu;
- profilaktycznie przed pływaniem: 1 dawka do każdego ucha.

Stosować pod nadzorem osoby dorosłej. Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu.

Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli:

- w celu usunięcia zalegającej woskowiny: 1-2 dawki 3 razy dziennie do każdego ucha, aż do rozpuszczenia woskowiny;
- profilaktycznie w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny: 1 dawka 1-2 razy w tygodniu;
- profilaktycznie przed pływaniem: 1 dawka do każdego ucha.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie wyrobu medycznego jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki wyrobu *Spray do higieny uszu*

Nie stosować większych dawek niż zalecane bez konsultacji z lekarzem.

Pominięcie zastosowania wyrobu *Spray do higieny uszu*

Pominięcie dawki wyrobu nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonej terapii.

Należy kontynuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania wyrobu i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem. O wszystkich działaniach niepożądanych należy poinformować wytwórcę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ WYRÓB SPRAY DO HIGIENY USZU

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy. Nie stosować wyrobu medycznego *Spray do higieny uszu* po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. SKŁAD WYROBU MEDYCZNEGO SPRAY DO HIGIENY USZU

Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbata 80.

7. OPIS OPAKOWANIA

Spray do higieny uszu pakowany jest w buteleczkę zawierającą 20 ml płynu. Buteleczka zaopatrzona jest w dozownik. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, buteleczkę o pojemności 20 ml z płynem oraz instrukcję używania.

Opis symboli zamieszczonych na opakowaniu produktu

	Nie używać w przypadku uszkodzonego lub otwartego opakowania		
	Zajrzyj do instrukcji używania		
	Termin ważności		
	Ograniczenie dopuszczalnej temperatury		
	Ostrzeżenie		
	Numer serii		Dystrybutor
	Producent		WYRÓB MEDYCZNY

Starpharma Sp. z o.o.
ul. Jedności 9
05-506 Lesznowola, Polska

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl

U/01/2021
Rev.2, 31.12.2023

